

## 仕様




型式	TC-220DH	承認番号	21900BZX00828000
商品コード	41000015	電源電圧	AC100V 15A
医療機器クラス分類	管理医療機器（クラスII）	消費電力	1300W
滅菌温度	121°C/132°C/135°C/フリーモード（115～135°C迄1°C単位で設定可）		
安全装置	異常高温 / 高圧防止装置、圧力安全弁、非常停止機能付電源スイッチ、扉閉スイッチ、漏電ブレーカー		
缶体寸法	Φ220×345mm（有効寸法）		
缶体容量	13.5L（丸カストΦ18cm×2個 / ボトル250cc×8本）		
滅菌プログラム	標準×4、液体×1		
本体寸法（W×D×H）	440（+ホース35mm）×507（+ハンドル70mm）×365mm		
重量	約30kg		
付属品	滅菌かご、スノコ		

### ● 付属品



### ● 電源

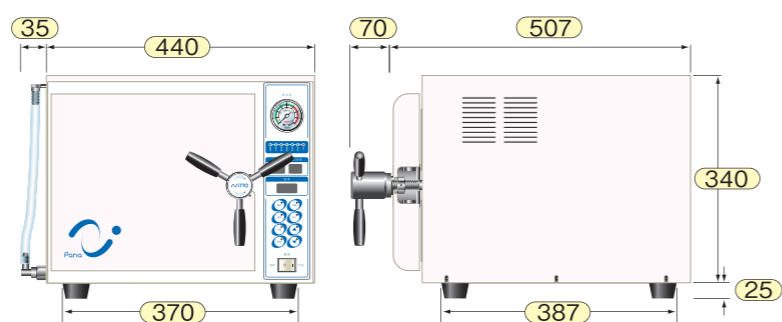

発売元

 **日東産業株式会社**

<b>東京本社</b>	<b>大阪営業所</b>	<b>福岡営業所</b>
東京都江戸川区 西一之江1-3-10	大阪府門真市 垣内町4-21	福岡県粕屋郡篠栗町 尾仲863-48
TEL: 03-5678-7191 FAX: 03-5678-7193	TEL: 06-6900-1370 FAX: 06-6900-1376	TEL: 092-948-3902 FAX: 092-948-3903

URL [www.knitto.com](http://www.knitto.com) E-mail [info@knitto.com](mailto:info@knitto.com)

お問い合わせ

## 高圧蒸気滅菌器

# NEW

# パナオート

先進の機能・スピーディーな滅菌で

クリニックの回転率に貢献。



 **NITTO**

診療時間や患者さんの回転に合わせて

先生がたのニーズを集結したモデルが登場。

## ポイント

多機能で高性能！

必要な機能だけを厳選

6日後までの予約機能

滅菌したての器具で診療スタート

診療サイクルに合わせて選べる

5種類の滅菌プログラム



滅菌時間を  
自在にコントロール。

5種類の滅菌プログラム → 通常滅菌：4種類（標準モード3種類、フリーモード1種類）  
液体滅菌：1種類（ボトルモード1種類）

- **標準モード** 初期設定の滅菌温度で通常滅菌することができます。
- **フリーモード** 滅菌プログラムの温度・時間を任意の滅菌条件に変更し、通常滅菌することができます。（滅菌条件の設定は、記憶されます。）
- **ボトルモード** ボトル（滅菌ビン）に入れた水を液体滅菌することができます。


初期設定

モード	滅菌温度	滅菌時間	乾燥時間
標準	121°C	20分	30分
	132°C	10分	30分
	135°C	3分	30分
フリー	126°C	15分	30分
ボトル	115°C	50分	

NEW パナオートの  
特徴

- **高性能マイコン制御**により、機能性を向上。
- **加圧排気制御**により、蒸気の浸透性を高め、滅菌効果を向上。
- 高性能エアープンプによる**加圧乾燥制御**により、乾燥効果を向上。
- 常にチャンバー内の**温度を監視**し、コントロール。
- **自己診断機能**で、常にプログラム動作を監視し、チェック。
- **5種類の滅菌プログラム**により、被滅菌物にあわせて選択することができます。

使いやすさも  
抜群です。

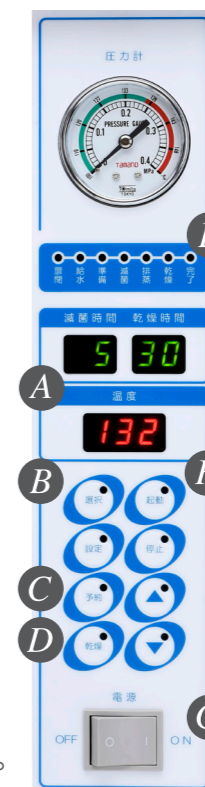

- A. 3種類のディスプレイで、温度・時間等を一目で確認。
- B. 5種類の滅菌プログラムをワンタッチで選択。
- C. 6日後までの予約が可能。
- D. 乾燥プログラムにより、再乾燥もOK。
- E. 7種類の行程表示により、運転中の行程も見やすく。
- F. 2回目からはワンタッチ操作で運転。
- G. 非常停止機能付電源スイッチで、非常時に自動的にOFF。